

Detectare antigene din materii fecale

Probele se recoltează în recipiente fără mediu de transport, special destinate recoltării de materii fecale.

Se recoltează din porțiunile modificate mucopurulente și/sau sanguinolente.

În cazul scaunelor lichide se prelevează cu spatula aproximativ 2-3 ml de probă.

În cazul scaunelor semilegate se prelevează o cantitate de mărimea unei alune, din 3 zone diferite ale bolului fecal.

Se evită contaminarea cu urină, apă din toaletă sau hârtie igienică.

Proba are stabilitate 24h la temperatura de 2-8°C. Se recomandă ca proba să fie examinată în cel mai scurt timp de la prelevare.